

Erklärung des Nadelcodes

Form

Gerade

3/8

Halbkreis



Form

3/8 RC18

Länge (in mm)

Typ

Nadel Typ

Spitze

Beschreibung

Indikation

Schneidend



Dreieckige Spitze mit schneidender äußerer Krümmung.

Dieser Nadeltyp hat 3 Schneidkanten und ist für schwer zu durchdringendes Gewebe wie Haut, Sehnenscheiden und Mundschleimhaut konzipiert. Er ist auch in der kosmetischen und ophthalmologischen Chirurgie hilfreich.


Rundkörper



Runder Körper, gerade oder gebogen, mit spitz zulaufender Spitze ohne Schneidkante.

Dieser Nadeltyp dringt durch Dehnung durch das Gewebe, ohne es zu zerschneiden. Diese Nadel minimiert das mögliche Reißen des Gewebes und wird für leicht zu durchdringende Gewebe verwendet, wie z.B. Peritoneum, Dura, Subkutis.

Nadelkrümmung

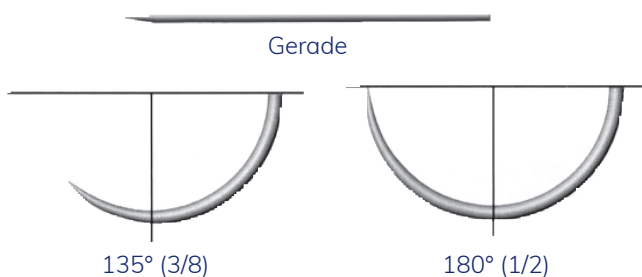

Öhrtyp



Schablonen-Übersicht

Gerade

41 mm

38 mm

33 mm

31 mm

3/8 Kreis

16 mm

30 mm

55 mm

90 mm

1/2 Kreis

16 mm

30 mm

55 mm

80 mm